

FAST
即時

SAFE
非侵入

EXACT
易判讀



AI科技

腦波評估心理壓力



• 精神不集中

• 難入睡

• 人生沒希望

• 心情煩躁

• 胃口差

• 情緒低落

• 感到疲倦

「憂可視SEA腦波壓力評估」只要15分鐘立即看報告，是心理健康篩檢及臨床上的AI得力助手。已於2023年取得衛福部軟體醫材許可證。目前用於全台20家以上醫療院所和健檢中心，也提供於企業員工輔助方案(EAP)。

★ 國家級認證

榮獲衛福部、FDA、TFDA等多項專業醫療許可認證
取得ISO13485國際認證，符合高標準醫療服務

★ 創新技術

運用AI腦波分析系統，開創心理健康評估新紀元

★ 獲獎肯定

2022年獲選第19屆國家新創獎

2024年榮獲Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎



FB粉絲頁



官網

宏智生醫委託國內三大醫院收集憂鬱症患者腦波數據，開發出「憂可視SEA腦波壓力評估系統」，擷取90秒腦波訊號並以特有的AI演算法分析，產出客觀的壓力評估分數(1~10)。



長者族群或工作壓力大上班族 客觀評估心理健康狀況的工具

SEA 使用流程

- 1 配戴腦波帽
- 2 填寫基本資料和 PHQ-9
- 3 頭皮間上導電膠，調整訊號
- 4 看著螢幕 90 秒

※ 檢測過程約 15-20分鐘
立即產出報告



評估報告

綜合心理評估

由SEA腦波系統量化的壓力指數，結合自我評估的PHQ-9量表分數，可得到A~I等級落點。圖中粉紅色區域為高壓力區。

| 綜合評估表 | | | SEA腦波壓力指數 | | |
|----------------------------|----------------------------|---|-----------|--------|---------|
| | | | 生理訊號指數 | | |
| | | | 低(1~4) | 中(5~8) | 高(9.10) |
| P H Q 9 指 數 | 主 觀 情 緒 壓 力 | 低 | A | B | C |
| | | 中 | D | E | F |
| | | 高 | G | H | I |

視覺化分布圖

綠點▼代表您的壓力評估指標，分佈圖中顏色較深代表越接近高壓力個體的腦波，顏色較淺則代表越接近健康族群的腦波。

